

## Indications

EasySoft Confort est une lentille souple trimestrielle en Silicone Hydrogel pour toutes amétropies :

- **Myopes et hypermétropes**
  - EasySoft Confort : pour toutes amétropies sphériques
- **Astigmatismes**
  - EasySoft Confort Toric : Torique antérieure

## Caractéristiques techniques

Matériau	SiH75
Rayon $r_0$	De 7,80 à 10,50 par pas de 0,10 mm
Diamètre $\varnothing_T$	De 12,00 à 16,00 mm par pas de 0,10 mm
Puissances P	De +30,00 à -30,00 $\delta$ par pas de 0,25 $\delta$ Cylindres : de -0,50 à -6,00 $\delta$ par pas de 0,25 $\delta$ Axes : tous axes par 1°
Conditionnement	En flacon à l'unité

## Consignes

Renouvellement	À port journalier
Entretien	Cleadew Soft ou Oté Clean (savon) + Multifonctions pour lentilles souples

## Adaptation

### EasySoft Confort

$\varnothing_T = 14,00$  mm

$R_0 = 8,60$  mm pour  $7,60 \leq K \leq 8,20$  mm

P = sphère VL ramenée au sommet cornéen

### EasySoft Confort Toric

$\varnothing_T = 14,40$  mm

$R_0 = 8,60$  mm pour  $7,60 \leq K_m \leq 8,20$  mm

P = puissances VL ramenées au sommet cornéen

Tél. +33 231 86 66 56

Fax. +33 231 86 66 86

[info@laboratoire-lcs.com](mailto:info@laboratoire-lcs.com)



LCS