



Prothétique™

Lentille souple à iris peint

Indications

Les lentilles LCS Prothétique ont pour objectif de masquer les traumatismes de la cornée ou de l'iris et d'améliorer l'esthétique ou la qualité visuelle du patient en cas de :

- Cicatrices cornéennes
- Cornées opaques
- Traumatisme de l'iris
- Aniridie
- Colobome

Caractéristiques techniques

Diamètre \varnothing_T	14,50 mm (disponible en 13,00/13,50/14,00/15,00 mm)
Diamètre $\varnothing_{\text{iris}}$	12,00 mm (disponible en 13,00 mm) Possibilité d'iris avec ou sans sous couche
Diamètre \varnothing_{pup}	Pupille ouverte : 2,50/3,50/4,50 mm Pupille noire : 2,50/3,00/3,50/4,00/4,50/5,00/5,50/6,00/6,50 mm Pupille d'occlusion (sans iris de couleur) : de 3,50 à 9,00 mm par pas de 0,50 mm
Rayon R_0	De 8,00 à 9,40 mm par pas de 0,20 mm
Puissances P	De -20,00 à +20,00 δ par pas de 0,25 δ
Couleurs	Panel de 10 couleurs (Cf Nuancier)
Conditionnement	Flacon à l'unité

Consignes

Renouvellement	1 an à port journalier
Entretien	Cleadow Soft ou Multifonctions pour lentilles souples ou peroxydes

Adaptation

Paramètres de la lentille d'essai :

$\varnothing_T = 14,50$ mm (standard)

$R_0 = Km + 1$ mm

Si Km non mesurable, faire essai avec $R_0 = 8,60$ mm

P = puissances VL ramenées au sommet cornéen



Prothétique™

Lentille souple à iris peint

Nuancier

A - Couleur avec sous-couche


B - Couleur sans sous-couche



Pupille ouverte
(optique)



Pupille noire
(occultante)

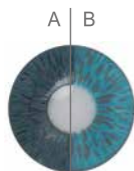


02



04



06

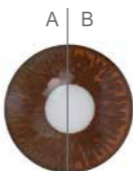


07



09



10

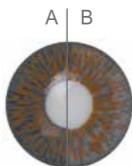

11



12



13



14

LCS © ALL RIGHTS RESERVED 2020 - 06/20

Tél. +33 231 86 66 56
Fax. +33 231 86 66 86
info@laboratoire-lcs.com



LCS

WWW.LABORATOIRE-LCS.COM