

MANIPULEZ
VOS LENTILLES
EyeBrid™



VOS LENTILLES
MADE IN FRANCE



LCS

CONSEILS POUR LA POSE, LE RETRAIT ET L'ENTRETIEN DES LENTILLES HYBRIDES

Sommaire

LA POSE 4/7

LE RETRAIT 8/9

L'ENTRETIEN 10/11

CONSEILS 12/13

Bienvenue chez LCS

Les lentilles EyeBrid sont des **lentilles hybrides**, c'est à dire qu'elles sont composées de deux matériaux différents : le centre en matériau rigide à haute perméabilité à l'oxygène, la périphérie en matériau souple Silicone Hydrogel de dernière génération.

Développée et fabriquée en France par une équipe de Recherche et Développement basée à Caen, **EyeBrid allie le confort et la qualité visuelle dans une même lentille.**

La lentille EyeBrid offre **une sécurité maximale** et un respect total de la santé oculaire grâce à sa **parfaite oxygénation de l'œil** et la présence d'un **filtre UV protecteur**.

EyeBrid est une lentille **à port quotidien**. Elle doit donc être retirée, nettoyée et déposée dans un étui quotidiennement. **Son renouvellement fréquent** par une lentille neuve permet un entretien simple et des lentilles toujours confortables.

Elle se manipule différemment d'une lentille souple et nous vous invitons à lire ce guide attentivement et à suivre les recommandations qui vous sont données afin de profiter pleinement des avantages que vous offrent vos nouvelles lentilles.



Hygiène des mains

1 Avant chaque pose

- Une bonne hygiène des mains est le premier pas vers un port confortable et pérenne. Lavez-vous systématiquement les mains avec du savon, rincez-les abondamment et séchez-les avec une serviette propre avant de manipuler vos lentilles.
- Maquillez-vous toujours après avoir posé vos lentilles. Il est préférable de ne pas utiliser de crayon sur le bord interne des paupières. De la même manière, démaquillez-vous uniquement après avoir retiré vos lentilles de contact afin d'éviter toute contamination.

2 L'ouverture de l'étui

- Vérifiez que l'étui soit intact avant la 1ère utilisation. La lentille doit toujours être immergée dans la solution prévue à cet usage.
- Une procédure de rinçage doit être effectuée avant la 1ère pose.

- Placez-vous de préférence au dessus d'une surface propre et bien dégagée.
- Commencez toujours par manipuler la même lentille pour éviter toute inversion. Si vous êtes droitier, commencez à chaque fois par la lentille droite.
- Retirez la lentille de son étui avec votre doigt en prenant soin de ne pas abimer la lentille avec vos ongles.

3 Rincez votre lentille

- Si vous manipulez votre lentille au-dessus d'un lavabo, assurez-vous que celui-ci est bien fermé.
- Posez la lentille dans la paume de votre main et rincez-la avec du sérum physiologique sans conservateur pour retirer toute impureté. Il est formellement interdit de rincer vos lentilles de contact à l'eau courante.



Rinçage de la lentille



Vérification de l'intégrité de la lentille

4 Vérifiez votre lentille

- Assurez-vous que votre lentille soit propre, en bon état, et qu'elle ne présente ni débris, ni rayures, ni déchirures. Si la lentille semble endommagée, ne l'utilisez pas.




Instillation de gouttes hydratantes dans la lentille

5 Posez votre lentille

- Posez la lentille entre l'index et le majeur.
- Instillez 2 gouttes d'agent hydratant dans la lentille.
- Utilisez un miroir posé à plat puis regardez-vous dans le miroir.
- Utilisez votre annulaire pour écarter la paupière inférieure et votre autre main pour écarter la paupière supérieure en les maintenant à la base des cils pour éviter tout clignement.

- Approchez la lentille de votre oeil et posez-la délicatement sur la cornée. Lâchez doucement les paupières et clignez plusieurs fois pour évacuer l'excès de larmes.

Astuce : une bague de manipulation peut vous aider pour la pose de votre lentille. Demandez conseil à votre spécialiste

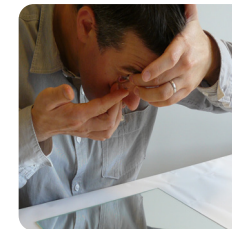

Pose de la lentille

6 Contrôlez votre lentille

- Contrôlez le centrage de la lentille sur votre oeil. Si vous remarquez des bulles d'air, un problème de centrage ou en cas d'inconfort, retirez la lentille, rincez-la abondamment et reposez-la en suivant la même procédure.

Des vidéos de pose de la lentille sont disponibles sur www.laboratoire-lcs.com




Etuis et produits prêts avant retrait

1 Avant chaque retrait

- Lavez-vous les mains soigneusement et assurez-vous d'avoir un étui propre, une serviette propre et vos produits d'entretien à portée de main.
- Commencez toujours par manipuler la même lentille pour éviter toute inversion droite/gauche.

2 Retirez votre lentille avec une ventouse

- Maintenez la ventouse de retrait entre le pouce et l'index et regardez-vous dans le miroir. Positionnez votre majeur juste en dessous du bord libre de la paupière inférieure et l'index de l'autre main sur le bord libre de la paupière supérieure. Placez la ventouse sur le bord inférieur de la partie souple et soulevez la. La lentille perd son adhésion par le bas, puis toute la lentille se libérera d'elle-même. Vous pouvez maintenant la réceptionner avec votre pouce et index.

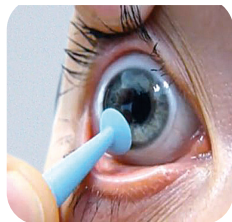

Retrait de la lentille

- **Ne « pincez » pas** la lentille qui est à manipuler avec précaution. Veillez également à ne pas abimer la lentille avec vos ongles.

- Consultez votre spécialiste si le retrait est difficile. Le retrait d'une lentille est un geste précis qui peut demander un peu d'entraînement. La manipulation de retrait se maîtrise facilement en suivant rigoureusement les instructions.

- L'utilisation d'une ventouse est recommandée pour le retrait de votre lentille EyeBrid.



Des vidéos de pose de la lentille sont disponibles sur www.laboratoire-lcs.com

Vos lentilles Eyebrid doivent être minutieusement entretenues. Le respect des règles d'entretien vous garantira un port confortable en toute sécurité.

Le nettoyage de votre lentille

- Il est impératif de systématiquement nettoyer vos lentilles après les avoir portées et suivre les instructions de nettoyage de votre spécialiste.
 - Avant de procéder au nettoyage de votre lentille, videz votre étui à lentilles. Ne réutilisez jamais la solution restante et renouvelez systématiquement la totalité du liquide.
 - Au retrait de la lentille, massez votre lentille avec un produit approprié.
 - Placez votre lentille dans son étui et respectez les recommandations fournies par le fabricant de votre produit lentille.
 - Après une semaine sans utilisation des lentilles, la solution de décontamination doit être renouvelée avant de poser les lentilles sur les yeux.
 - Veillez à garder votre étui propre et remplacez-le régulièrement.
- Adressez-vous à votre contactologue pour plus d'informations.

Les bons produits

- Pour l'entretien de vos lentilles hybrides, utilisez **un produit multifonction ou peroxyde d'hydrogène pour lentilles au quotidien**.
- Il est recommandé d'utiliser **un surfactant au quotidien** et **une déprotéinisation hebdomadaire**.
- Votre adaptateur pourra vous indiquer les produits appropriés pour l'entretien de vos lentilles hybrides. Suivez scrupuleusement ses recommandations.
- Pour une manipulation facilitée, utilisez une bague de manipulation et une ventouse de retrait.

Précautions d'emploi

- Consultez toujours votre praticien pour une première utilisation, puis régulièrement afin de vérifier que vos lentilles soient toujours bien adaptées et en bon état.
- Les complications oculaires liées au port de lentilles sont rares si vous suivez les recommandations des professionnels. Toutefois, si les symptômes suivants se produisent, retirez vos lentilles et contactez votre ophtalmologiste :
 - Un oeil rouge ou irrité ;
 - Une sensation d'inconfort ou de gêne persistante ;
 - Un changement anormal de votre vision ;
 - Une sensibilité accrue à la lumière ;
 - Des larmoiements ou une sensation de sécheresse.
- Si vous sentez une gêne anormale, retirez votre lentille et rincez-la avec une solution de rinçage.
- En cas de grossesse, de prise de certains médicaments ou de pathologies oculaires, le port de lentilles peut-être contre-indiqué : retirez vos lentilles et consultez votre praticien.
- Prenez conseil auprès de votre praticien avant d'utiliser un collyre.
- Les lentilles peuvent être inconfortables dans les milieux très poussiéreux, lorsque les lentilles sont exposées à un gaz ou à des liquides toxiques ou irritants et au cours de situations dangereuses liées à une activité professionnelle.
- Les sports de baignade sont inadaptés au port de lentilles en raison de la majoration du risque infectieux lié aux amibes présentes dans l'eau des rivières et des piscines.

- La cornée sous lentille peut manquer d'oxygène lors des efforts prolongés ou en haute altitude.
- Les lentilles ne protègent pas l'oeil des coups directs (balle de tennis, de golf...).

En cas de perte ou de casse

- Avoir une paire de lentilles de secours élimine tout risque d'avoir un confort visuel interrompu.



DÉCOUVREZ
NOS VIDÉOS
POUR
MANIPULER
VOS LENTILLES
EyeBrid™



WWW.LABORATOIRE-LCS.COM

14 place Gardin - 14000 Caen - France
Tél. +33 231 86 66 56 • Fax. +33 231 86 66 86
info@laboratoire-lcs.com

LCS © ALL RIGHTS RESERVED 2021 - 05/21

VOS LENTILLES
MADE IN FRANCE



LCS