



MANIPULEZ
VOS LENTILLES
EyeBrid™



VOS LENTILLES
MADE IN FRANCE



LCS

CONSEILS POUR LA POSE, LE RETRAIT ET L'ENTRETIEN DES LENTILLES HYBRIDES

Sommaire

LA POSE 4/7

LE RETRAIT 8/9

L'ENTRETIEN 10/11

CONSEILS 12/13

Bienvenue chez LCS

Développée et fabriquée en France par notre équipe de Recherche et Développement basée à Caen, **EyeBrid allie le confort et la qualité visuelle dans une même lentille.**

Les lentilles EyeBrid sont des **lentilles hybrides**, c'est à dire qu'elles sont composées de deux matériaux différents : le centre en matériau rigide à haute perméabilité à l'oxygène, la périphérie en matériau souple Silicone Hydrogel de dernière génération.

La lentille EyeBrid offre **une sécurité maximale** et un respect total de la santé oculaire grâce à sa **parfaite oxygénation de l'œil.**

EyeBrid est une lentille à **port quotidien**. Elle doit donc être retirée, nettoyée et déposée dans un étui quotidiennement. **Son renouvellement fréquent** par une lentille neuve permet un entretien simple et des lentilles toujours confortables.

La manipulation est spécifique. Nous vous invitons à lire ce guide attentivement et à suivre les recommandations qui vous sont données afin de profiter pleinement des avantages que vous offrent vos nouvelles lentilles.

VOS LENTILLES
MADE IN FRANCE





Hygiène des mains

1 Avant chaque pose

- Une bonne hygiène des mains est le premier pas vers un port confortable et pérenne. Lavez-vous systématiquement les mains avec du savon, rincez-les abondamment et séchez-les avec une serviette propre non pelucheuse avant de manipuler vos lentilles.
- Maquillez-vous toujours après avoir posé vos lentilles. Il est préférable de ne pas utiliser de crayon sur le bord interne des paupières. De la même manière, démaquillez-vous uniquement après avoir retiré vos lentilles de contact afin d'éviter toute contamination.



2 L'ouverture de l'étui

- Vérifiez que l'étui soit intact avant la 1ère utilisation. La lentille doit toujours être immergée dans la solution prévue à cet usage.
- Une procédure de rinçage doit être effectuée avant la 1ère pose.

3 Rincez votre lentille

- Si vous manipulez votre lentille au-dessus d'un lavabo, assurez-vous que celui-ci est bien fermé.
- Posez la lentille dans la paume de votre main et rincez-la avec du sérum physiologique sans conservateur pour retirer toute impureté. Il est formellement interdit de rincer vos lentilles de contact à l'eau courante. 



Rinçage de la lentille



Vérification de l'intégrité de la lentille

4 Vérifiez votre lentille

- Assurez-vous que votre lentille soit propre, en bon état, et qu'elle ne présente ni débris, ni rayures, ni déchirures. Si la lentille semble endommagée, ne l'utilisez pas.



Instillation de gouttes hydratantes dans la lentille

5 Posez votre lentille

- Posez la lentille entre l'index et le majeur.
- Instillez 2 gouttes d'agent hydratant sans conservateur dans la lentille.
- Utilisez un miroir posé à plat puis regardez-vous dans le miroir.
- Utilisez votre annulaire pour écarter la paupière inférieure et votre autre main pour écarter la paupière supérieure en les maintenant à la base des cils pour éviter tout clignement.

- Approchez la lentille de votre oeil et posez-la délicatement sur la cornée. Lâchez doucement les paupières et clignez plusieurs fois pour évacuer l'excès de larmes.


Astuce : une bague de manipulation peut vous aider pour la pose de votre lentille. Demandez conseil à votre spécialiste




Pose de la lentille

6 Contrôlez votre lentille

- Contrôlez le centrage de la lentille sur votre oeil. Si vous remarquez des bulles d'air, un problème de centrage ou en cas d'inconfort, retirez la lentille, rincez-la abondamment et reposez-la en suivant la même procédure.

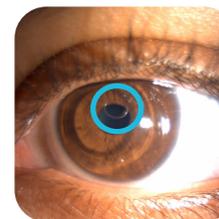

Bulle présente, refaire la manipulation

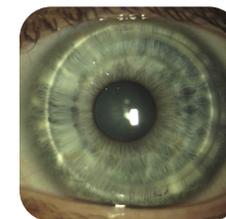

Pas de bulle, position de la lentille correcte




Etuis et produits prêts avant retrait

1 Avant chaque retrait

- Lavez et séchez-vous les mains soigneusement et assurez-vous d'avoir un étui propre, une serviette propre non pelucheuse et vos produits d'entretien à portée de main.
- Commencez toujours par manipuler la même lentille pour éviter toute inversion droite/gauche.



Retrait de la lentille avec une ventouse DS

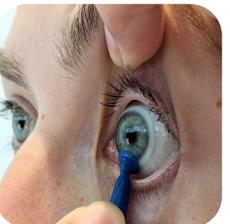

Retrait de la lentille avec une ventouse DI

2 Retirez votre lentille avec une ventouse

- Maintenez la ventouse de retrait entre le pouce et l'index et regardez-vous dans le miroir.
- Positionnez votre majeur juste en dessous du bord libre de la paupière inférieure et l'index de l'autre main sur le bord libre de la paupière supérieure.
- Placez la ventouse sur le bord inférieur de la partie souple et soulevez-la. La lentille perd son adhésion par le bas, puis toute la lentille se libérera d'elle-même. Vous pouvez maintenant la réceptionner avec votre pouce et index.

- **Ne « pincez » pas** la lentille qui est à manipuler avec précaution. Veillez également à ne pas abimer la lentille avec vos ongles.

- Consultez votre spécialiste si le retrait est difficile. Le retrait d'une lentille est un geste précis qui peut demander un peu d'entraînement. La manipulation de retrait se maîtrise facilement en suivant rigoureusement les instructions.

- L'utilisation d'une ventouse est recommandée pour le retrait de votre lentille. Lisez et suivez bien le mode d'emploi des ventouses avant de les utiliser et de les nettoyer.



Vos lentilles Eyebrid doivent être minutieusement entretenues. Le respect des règles d'entretien vous garantira un port confortable en toute sécurité.

Le nettoyage de votre lentille

- Il est impératif de systématiquement nettoyer vos lentilles après les avoir portées et suivre les instructions de nettoyage de votre spécialiste.
- Avant de procéder au nettoyage de votre lentille, videz votre étui à lentilles. Ne réutilisez jamais la solution restante et renouvelez systématiquement la totalité du liquide.
- Au retrait de la lentille, massez votre lentille avec un produit approprié (selon les conseils de l'adaptateur).
- Placez votre lentille dans son étui et remplissez-le avec le produit que vous a prescrit votre contactologue. Pensez à placer la lentille droite dans le compartiment noté R (Right) et la gauche dans le compartiment noté L (Left).
- Pour une parfaite décontamination, placez votre lentille dans son étui et suivez rigoureusement les recommandations indiquées sur la notice du produit utilisé.
- Après une semaine sans utilisation des lentilles, la solution de décontamination doit être renouvelée avant de poser les lentilles sur les yeux.
- Veillez à garder votre étui propre et remplacez-le régulièrement. Adressez-vous à votre adaptateur pour plus d'informations.

Le nettoyage de vos ventouses

- Il est impératif de systématiquement nettoyer vos ventouses au sérum physiologique et au savon pour les ventouses LCS, sinon de vous référer à la notice du fabricant. Laissez ensuite les ventouses sécher à l'air libre après rinçage.

Les bons produits

- Pour l'entretien de vos lentilles hybrides, utilisez :
 - Le **Cleadow MPS** et le **LCS Clean au quotidien**.
 - Ou le **Cleadow Soft seul au quotidien**.
 - Ou le **LCS Perox** associé à un **déprotéinisant (LCS Enzym) une fois par semaine** si vous n'utilisez pas le **Cleadow Soft**.
- Votre adaptateur pourra vous indiquer les produits appropriés pour l'entretien de vos lentilles hybrides. Suivez scrupuleusement ses recommandations.
- Pour une manipulation facilitée, utilisez une bague de manipulation (**Type LCS RING**) et une ventouse de retrait (**Type LCS DS ou LCS DI**).



VOS LENTILLES
MADE IN FRANCE



Précautions d'emploi

- Consultez toujours votre praticien pour une première utilisation, puis régulièrement afin de vérifier que vos lentilles soient toujours bien adaptées et en bon état.
- Les complications oculaires liées au port de lentilles sont rares si vous suivez les recommandations des professionnels. Toutefois, si les symptômes suivants se produisent, retirez vos lentilles et contactez votre ophtalmologiste :
 - un oeil rouge ou irrité ;
 - une sensation d'inconfort ou de gêne persistante ;
 - un changement anormal de votre vision ;
 - une sensibilité accrue à la lumière ;
 - des larmoiements ou une sensation de sécheresse.
- Si vous sentez une gêne anormale, retirez votre lentille et rincez-la avec une solution de rinçage.
- En cas de grossesse, de prise de certains médicaments ou de pathologies oculaires, le port de lentilles peut-être contre-indiqué : retirez vos lentilles et consultez votre praticien.
- Retirez immédiatement les lentilles de contact lorsqu'elles ont été exposées à des gaz toxiques (par exemple, des produits chimiques ou des substances dangereuses) ou à un environnement dangereux avec impact oculaire.
- Ne mettez pas vos lentilles en contact avec de la laque ou toute autre produit cosmétique en aérosol.
- Ne portez pas vos lentilles si vous êtes exposé aux fumées dangereuses ou irritantes.
- Ne pas utiliser si la date limite de 1ère utilisation est dépassée.

- N'utilisez ni votre salive ni aucun produit ménager pour l'entretien de vos lentilles : utilisez uniquement les solutions d'entretien recommandées par votre spécialiste.
- Ne pas utiliser une solution d'entretien dont la date de péremption est dépassée ou ouverte depuis trop longtemps (voir notice du fabricant de la solution).
- Ne changez pas la marque de votre solution d'entretien sans consulter votre spécialiste.
- Les sports de baignade sont inadaptés au port de lentilles en raison de la majoration du risque infectieux lié aux amibes présentes dans l'eau des rivières et des piscines.
- Les lentilles ne protègent pas l'oeil des coups directs (balle de tennis, de golf...).
- La lentille ne doit jamais rester à sec. En cas de lentille séchée (déshydratée) : ne pas utiliser.
- Prenez conseil auprès de votre praticien avant d'utiliser un collyre.
- Les lentilles peuvent être inconfortables dans les milieux très poussiéreux, lorsque les lentilles sont exposées à un gaz ou à des liquides toxiques ou irritants et au cours de situations dangereuses liées à une activité professionnelle.
- La cornée sous lentille peut manquer d'oxygène lors des efforts prolongés ou en haute altitude.

En cas de perte ou de casse

- Avoir une paire de lentilles de secours élimine tout risque d'avoir un confort visuel interrompu.



DÉCOUVREZ
NOS VIDÉOS
POUR
MANIPULER
VOS LENTILLES
EyeBrid™



WWW.LABORATOIRE-LCS.COM

14 place Gardin - 14000 Caen - France

Tél. +33 231 86 66 56

info@laboratoire-lcs.com

LCS © ALL RIGHTS RESERVED 2023 - V3 09/23

CE 1639
VOS LENTILLES
MADE IN FRANCE



LCS